

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die oben angegebenen Verbrauchsmaterialien zur Mehrfachanwendung dienen bis maximal 24 Stunden zur Verabreichung von Kontrastmittel (KM) und Kochsalzlösung (NaCl) in der radiologischen Diagnostik der Computertomographie, Kernspintomographie und Röntgen-Mammographie. Die Verbrauchsmaterialien dürfen ausschließlich in Kombination mit Kontrastmittelinjektoren der MEDTRON AG eingesetzt werden, die einen maximalen Druck von bis zu 21 bar/ 305 psi bei der Anwendung aufbauen können.

Die Anwendung der Spritzen REF 312426-100 und 312465-100 in Kombination mit dem Schlauchsystem REF 312400-100 über einen Zeitraum von maximal 24 aufeinanderfolgenden Stunden gilt nur bei Einsatz eines dafür geeigneten MEDTRON-Patientenschlauchs REF 318415-100 mit zwei grünen Rückschlagventilen. Der Patientenschlauch muss nach jedem Patienten gewechselt werden. Die Spritzen REF 312426-100 und 312465-100 dienen als Dosierkammer für Kontrastmittel oder Kochsalzlösung. Mithilfe eines Kontrastmittelinjektors werden die Flüssigkeiten von einem Vorratsbehälter in die Spritze überführt und anschließend zur Verabreichung in den Patienten entleert. Nach einem Zeitraum von maximal 24 aufeinanderfolgenden Stunden müssen das Schlauchsystem, die Spritzen und die Spikes gewechselt werden.

Das Schlauchsystem REF 312400-100 dient dem Flüssigkeitstransfer von Kontrastmittel und Kochsalzlösung. Es dient zum Befüllen von Spritzen eines Kontrastmittelinjektors aus Vorratsbehältern und zur Durchleitung der Flüssigkeiten in den Patienten. Die Anwendung des Schlauchsystems mit gelbem Rückschlagventil gilt nur bei patientenbezogenem Wechsel des MEDTRON-Patientenschlauchs REF 318415-100 mit zwei grünen Rückschlagventilen. Nach einem Zeitraum von maximal 24 aufeinanderfolgenden Stunden müssen das Schlauchsystem, die Spritzen und die Spikes gewechselt werden.

Der Patientenschlauch REF 318415-100 dient dem Flüssigkeitstransfer von Kontrastmittel und Kochsalzlösung in den Patienten. Die Anwendung des Patientenschlauchs gilt nur für die einmalige Verwendung an einem einzigen Patienten, d. h. bei Wechsel des Patienten muss auch der Patientenschlauch gewechselt werden. Die Spikes REF 314095-100, 319099-100 und 319099-901 zur Mehrfachentnahme aus einem Vorratsbehälter dienen zum Befüllen von Spritzen aus Vorratsbehältern. Nach einem Zeitraum von maximal 24 aufeinanderfolgenden Stunden müssen das Schlauchsystem, die Spritzen und die Spikes gewechselt werden.

Die Anwendung der Produkte erfolgt durch medizinisch ausgebildetes und geschultes Fachpersonal. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Verwenden Sie die Produkte niemals für andere Zwecke!

Die MEDTRON AG gewährleistet die Eignung der Produkte für die bestimmungsgemäße Verwendung. Sonstige herstellereigene Anforderungen sind zu beachten.

Day Safe System

Mehrfach verwendbares Schlauchsystem für Injektion von Kontrastmittel und Kochsalzlösung in der CT- und MRT-Bildgebung

Gebrauchsanweisung für :

- Day Safe Spritzen 200ml Art. 312426-100
- Day Safe Spritzen 65ml Art. 312465-100
- Day Safe Füllschlauch D Art. 312400-100
- SURE Patientenschläuche 150cm Art. 318415-100
- Spike Art. 314095-100, und Mini Spike Art. 319099-100

Komponenten des Systems

Validiert für den 24-Stunden-Einsatz bei kombinierter Anwendung



24h Max. 24h anwendbar

- Uhrzeit zu Beginn der Anwendung
- Daten der Anwendung
- Angaben zum Inhalt der Spritze


Day Safe System

Mehrfach verwendbares Schlauchsystem für Injektion von Kontrastmittel und Kochsalzlösung in der CT- und MRT-Bildgebung

Einleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, um eine ordnungsgemäße Anwendung der Produkte und einen sicheren Betrieb des Injektors zu gewährleisten, und um Schäden durch unsachgemäße Anwendung bei Patienten, Anwendern und Dritten sowie Sachschäden zu vermeiden.

Einrichtung des Day Safe Systems 1x / 24 h

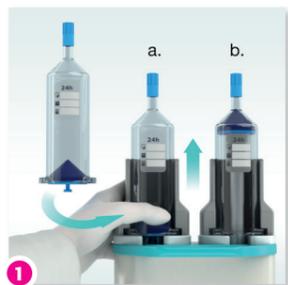

1 Day Safe Spritzen einsetzen
Kolben sofort hochfahren




2 Perforierter KM und NaCl
Behälter mit Spike



3 Tropfkammer am
Spike anschließen



4 Behälter an die
Injektorstange hängen

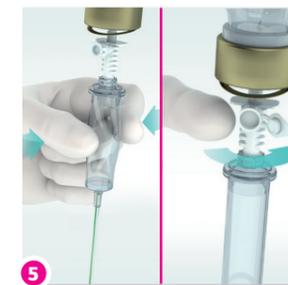

5 Tropfkammer aktivieren und
Lufteintritt öffnen



6 Schläuche an Spritzen anschließen


Füllung und Entlüftung des Day Safe Füllschlauchs D und SURE Patientenschlauchs ∞ / 24 h



1 Füllvolumen für KM am
Injektor eingeben



2 Füllvolumen für NaCl am
Injektor eingeben

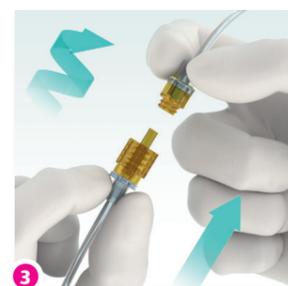

3 Patientenschlauch an den
Drop-Stop anschließen



4 KM entlüften mit
manuellen Tasten



5 NaCl entlüften mit
manuellen Tasten



6 Patientenschlauch mit gewählter
Flüssigkeit entlüften

Austausch Vial / Soft Bag Vial 1x / ⑧



1 Neuen Behälter
mit Spike einstecken



2 Tropfkammer vom leeren
Behälter abtrennen




3 Tropfkammer am neuen Spike an-
schließen. Aufhängen, Lufteingang
öffnen und aktivieren.


Änderung des SURE-Patientenschlauchs für jeden Patienten 1x / ⑧



1 Gebrauchten Patientenschlauch
vom Drop-Stop-Anschluss abtrennen

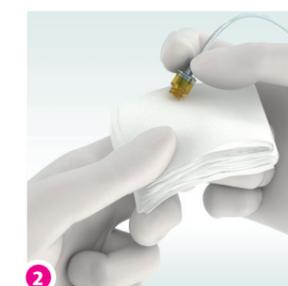

2 Drop-Stop-Anschluss
abtupfen, falls nötig

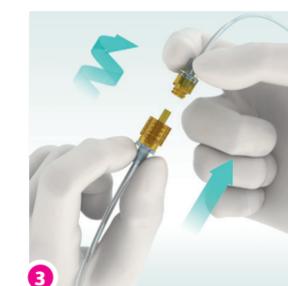

3 Neuen Patientenschlauch
anschließen und entlüften